

orthocaps[®]
creating smiles

Das **TwinAligner**[®]-System

- # unsichtbare Zahnkorrektur
- # unkomplizierte Anwendung
- # überzeugend präzise Ergebnisse



System und Vorteile

Einfach in der Anwendung, präzise im Ergebnis

Immer mehr Patienten legen heutzutage Wert darauf, beim Zahnarzt ganzheitlich behandelt zu werden. Das umfasst auch die Korrektur von schief stehenden Zähnen. Ein Anspruch, dem Sie jetzt gerecht werden können. Mit dem unsichtbaren, hocheffektiven und gut verträglichen orthocaps® Aligner. Das TwinAligner®-System lässt sich problemlos in Ihren Praxisalltag integrieren und bietet außerdem gleich zwei Innovationen, die Ihnen und Ihren Patienten die Behandlung leichter machen.



Neuartiges 2-Komponenten-Material

Die orthocaps Aligner werden aus besonders hochwertigem thermoplastischem 2-Komponenten-Material gefertigt. Die härtere äußere Schicht garantiert Stabilität und Haltbarkeit. Die innere Schicht aus weichem Kunststoff schmiegt sich passgenau und exakt an die Zähne an. Das sorgt für präzisere Resultate und einen Tragekomfort, den Ihre Patienten zu schätzen wissen.



Leichte Anwendung in der Praxis

Dank eines klar strukturierten Therapieverlaufs und der Unterstützung durch unser Support-Team lässt sich die Behandlung mit orthocaps® ohne Aufwand in Ihre Praxisabläufe integrieren.



Unkomplizierte Fallbeurteilung

Zur Fallbeurteilung steht Ihnen das orthocaps-Portal zur Verfügung. Einfach online extra- und intra-orale Fotos an uns übermitteln – eine Antwort erhalten Sie innerhalb von 48 h.



Intelligentes TwinAligner®-System

orthocaps ist das einzige System, das zwei Schientypen innerhalb eines Behandlungsschrittes einsetzt. So lassen sich die einwirkenden Kräfte exakter steuern und nutzen. Tagsüber wirken die dünnen DAYcaps sanft auf die Zähne ein, nachts entfalten die stabileren NIGHTcaps ihre korrigierende Wirkung. Das macht die Therapie mit orthocaps besonders sanft und schonend.

Optimale Therapiekontrolle

Nach Beendigung jeder Behandlungsphase nehmen wir eine exakte 3-D-Abweichungsanalyse vor. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass die Therapie Ihrer Patienten jederzeit 100%ig nach Plan verläuft.



DAYcaps



NIGHTcaps

Qualität made in Germany










Die orthocaps Aligner werden in unserer Produktionsstätte in Deutschland hergestellt. Das garantiert höchste Qualitätsstandards, kurze Versandwege und schnelle Reaktionszeiten.



Systemübersicht

Für jede Zahnfehlstellung das richtige System

Ganz gleich, ob ästhetische Korrektur oder komplexe Fehlstellung – mit orthocaps® lassen sich rund 90 % aller Zahnfehlstellungen präzise, effektiv und erfolgreich behandeln. Bei Erwachsenen und Teenagern. Übrigens: Auch Zahnärzte, die in ihrer Praxis erstmalig ein Aligner-System verwenden, kommen mit orthocaps meist problemlos zurecht.

	Child	Teen	Adult
orthocaps® TEN <i>in Kürze erhältlich</i>			
Indikationen: Leichte, ästhetische Fehlstellungen im Frontzahnbereich wie z. B. Eng-, Schief- oder Lückenstand, Harmonisierung des Zahnbogens.			
orthocaps® PRO			
Indikationen: Leichte bis mittelschwere Fehlstellungen wie z. B. Tiefbiss, offener Biss, Überbiss, verlagertes Zahn, Klasse-2-Okklusion, Engstand und komprimierter Zahnbogen.			
orthocaps® NOCTIS <i>in Kürze erhältlich</i>			
Indikationen: Ästhetische Fehlstellungen im Frontzahnbereich wie z. B. Eng-, Schief- oder Lückenstand.			



Behandlungsablauf

So unkompliziert ist die Therapie mit orthocaps®

Das orthocaps TwinAligner®-System lässt sich ganz leicht in Ihren Praxisalltag integrieren. Dank umfassender Schulungsmaßnahmen und eines klar strukturierten Behandlungsverlaufs kommen unsere Anwender meist problemlos mit orthocaps zurecht. Und falls doch Fragen auftreten, helfen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit gerne weiter.



Zusatzkomponenten

STEP 1: Einfache Fallbeurteilung online

Einfach extra- und intraorale Fotos übermitteln und wir schicken Ihnen innerhalb von 48 Stunden eine Einschätzung, ob Ihr Fall mit orthocaps® behandelt werden kann.



#STEP 2: Anamnese und Auftragserteilung

Zu Beginn benötigen wir Silikon-Abformungen (OK/UK), ein Bissregistrator, Fotografien und ein Panorama-Röntgenbild. Digitale Abformungen können Sie einfach online übermitteln.



#STEP 3: Präzise 3-D-Behandlungsplanung

Auf Basis der Abdrücke erstellen wir ein digitales 3-D-Modell mit dem Behandlungsziel. Bei Bedarf können Sie dieses jederzeit über Ihr Online-Konto bei orthocaps weiterbearbeiten.



#STEP 4: Maßgefertigte orthocaps® Aligner

Nachdem Sie das Behandlungsziel bestätigt haben, fertigen wir die maßgeschneiderten orthocaps Aligner. Das erste Schienen-Set erhalten Sie innerhalb von 2 bis 3 Wochen.




#STEP 5: Klar definierte Behandlungsphasen

Pro Behandlungsphase erhalten Sie acht, zehn oder zwölf Aligner-Sets, die Sie Ihren Patienten zur Selbstbehandlung mitgeben können.



#STEP 6: 3-D-Evaluation zur Therapiekontrolle


Nach Beendigung jeder Behandlungsphase wird ein detaillierter 3-D-Evaluationsbericht erstellt, damit Sie schnell auf eventuelle Abweichungen reagieren können.

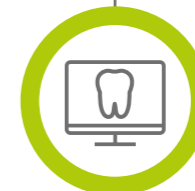

Software

Problemlose Behandlungsplanung in Ihrer Praxis

iSetup® ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie die einzelnen Behandlungsphasen präzise simulieren und visualisieren können. Die webbasierte Software läuft unter allen gängigen Betriebssystemen und ist nutzerfreundlich angelegt, um Ihnen den Einsatz in Ihrer Praxis so leicht wie möglich zu machen.

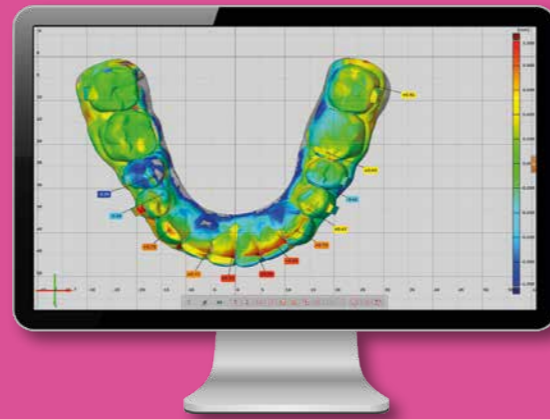

orthocaps® iSetup® 3-D


Dank zahlreicher innovativer Features können Sie Ihren Patienten mit dem iSetup den Therapieverlauf und die Behandlungsziele veranschaulichen und damit die Patientenzufriedenheit steigern.

- # einfache Handhabung der neuen iSetup Version 3-D
- # übersichtliche und intuitive Behandlungsplanung
- # schrittweise Prüfung der geplanten Bewegungen
- # Tools, um Änderungen am iSetup selbst vorzunehmen
- # bewegen Sie Zähne und platzieren Sie Attachments selbst

3-D-Behandlungsevaluation

Nach jeder Behandlungsphase wird ein detaillierter 3-D-Evaluationsbericht erstellt, damit Sie auf Abweichungen schnell reagieren und die Planung entsprechend anpassen können.

- # optimale Planungssicherheit und Therapiekontrolle
- # automatische Identifikation von Problembereichen
- # anschauliche Fortschritts- und Zielmodelle
- # Effizienzanalyse während der Behandlung
- # unkomplizierte Planungsanpassung

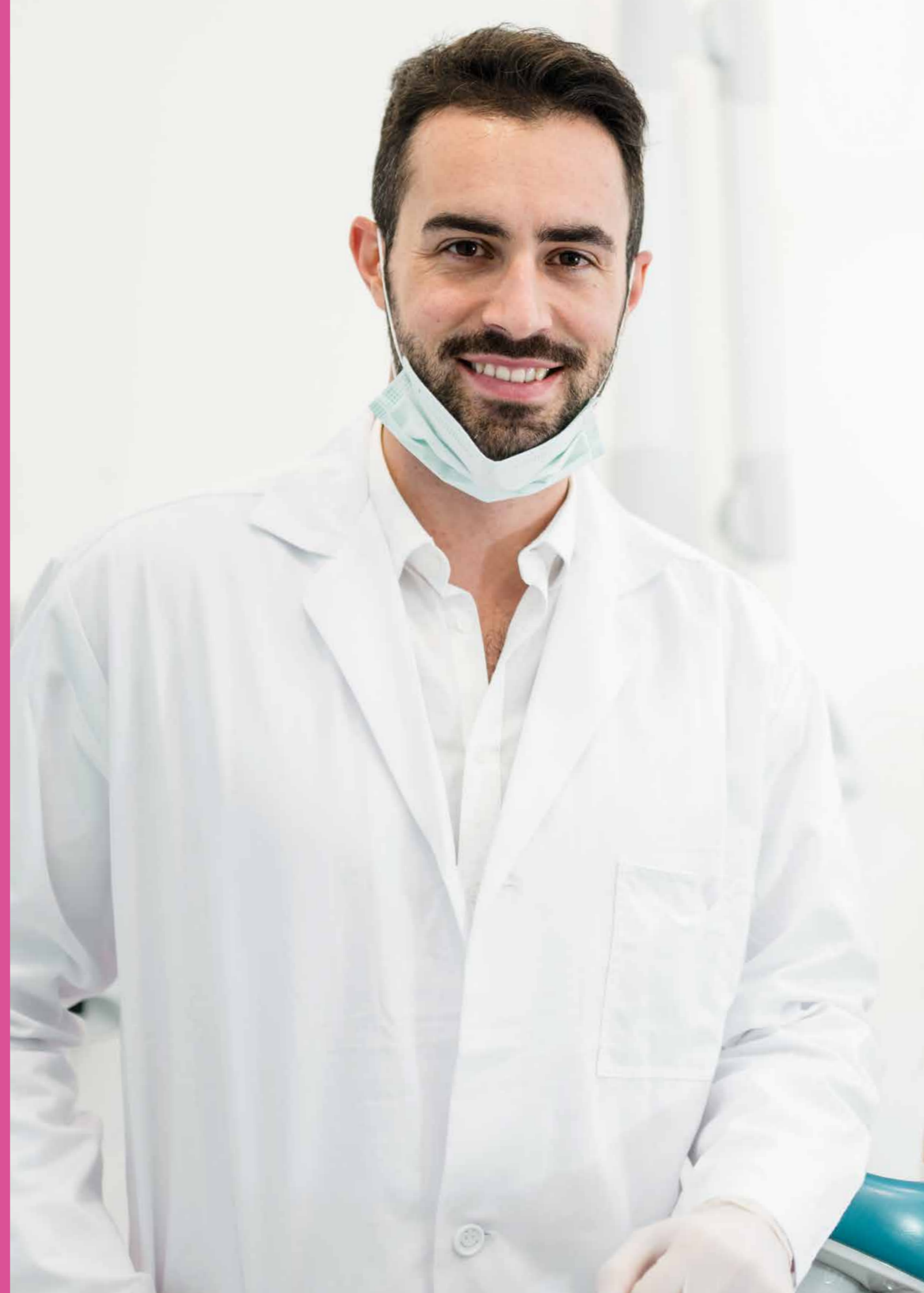

Service und Support

Ein hilfsbereites Spezialisten-Team für alle Fälle

Wir fühlen uns Ihnen als Behandler verbunden und möchten, dass sich die orthocaps® Aligner dort überzeugend durchsetzen, wo es wirklich darauf ankommt – in Ihrem Praxisalltag. Deshalb können Sie jederzeit auf unsere Unterstützung zählen. Unser Spezialisten-Netzwerk bündelt die Kompetenzen von Kieferorthopäden, Zahntechnikern und Beratern und begleitet Sie während des gesamten Workflows.

Telefonische Beratung


Unsere Spezialisten für Kieferorthopädie, Zahntechnik, Produktion und Beratung stehen Ihnen täglich von 8:00 Uhr – 17:00 Uhr zur Verfügung.

Persönliche Ansprechpartner

Gerne sind wir auch persönlich für Sie da. Einfach einen Termin vereinbaren und wir schicken Ihnen einen Spezialisten vorbei, der Sie zeitnah unterstützt.

Online-Support

Unser Anwender-Portal ermöglicht Ihnen eine schnelle, unkomplizierte Kommunikation mit orthocaps – kurze Reaktionszeiten garantiert.

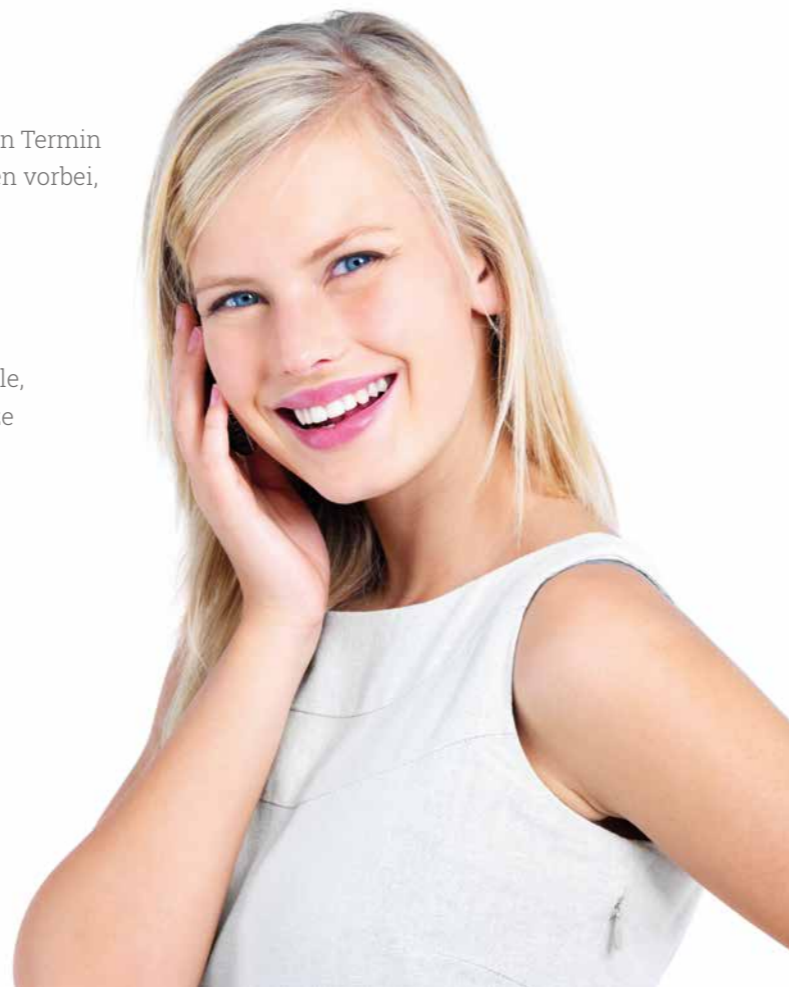

Zahnkorrektur mit orthocaps®? Eine Entscheidung, die sich lohnt.

Erweitern Sie jetzt Ihr zahnärztliches Angebot um ein innovatives Zahnkorrektursystem, das sich problemlos in Ihrer Praxis anwenden lässt. Mit orthocaps® können Sie Ihren Patienten den Traum von einem schönen, ebenmäßigen Lächeln ganz leicht erfüllen und so neue Maßstäbe im Bereich der ästhetischen Zahnmedizin setzen.

+49 (0) 2385 92190

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Besuchen Sie unsere Webseite:

www.orthocaps.de

Ortho Caps GmbH

An der Bever 8
59069 Hamm

+49 (0) 2385 92190

+49 (0) 2385 9219080

info@orthocaps.de

www.orthocaps.de



orthocaps[®]